

Eumill®

REPAIR

SÉCHERESSE OCULAIRE

GOUTTES OCULAIRES LUBRIFIANTES, HYDRATANTES ET RÉPARATRICES
ACIDE HYALURONIQUE RÉTICULÉ 0,4% AVEC DE L'URÉE À ACTION PROLONGÉE

EUMILL REPAIR est une solution ophtalmique stérile au pH physiologique, contenant de l'acide hyaluronique réticulé avec de l'urée, selon une technologie brevetée, visant à augmenter et à améliorer les propriétés mécaniques naturelles de l'acide hyaluronique, ce qui lui confère une résistance à la dégradation par les hyaluronidases plus durable que celle de l'acide hyaluronique naturel. La structure réticulée formée par l'acide hyaluronique hydrate et permet de retenir les molécules d'eau pendant une longue période, renforçant ainsi les propriétés lubrifiantes intrinsèques de l'acide hyaluronique tout en augmentant son action hydratante. L'acide hyaluronique réticulé est indiqué comme adjuvant dans le syndrome de l'œil sec. Il est également efficace pour lutter contre les radicaux libres et a une action réparatrice (ré-épithélialisante) pour une meilleure protection de la surface cornéenne. L'acide hyaluronique réticulé confère au produit des propriétés lubrifiantes, hydratantes et réparatrices. Il soulage également la sécheresse oculaire due au syndrome de l'œil sec, la fatigue ou l'irritation oculaire causées par des processus inflammatoires ou des conditions environnementales.

EUMILL REPAIR soulage les yeux rouges, la sécheresse, la fatigue et la gêne oculaire causés par le syndrome de l'œil sec, les facteurs environnementaux tels que le vent, la fumée, la pollution, l'exposition prolongée au soleil, le sel marin, l'eau de mer ou de piscine, les études ou le travail intensifs, l'utilisation prolongée de l'ordinateur, les longues périodes de conduite, les larmoiements générés par les processus inflammatoires, la chirurgie oculaire ou esthétique des paupières et la blépharite chronique. Il hydrate et lubrifie la cornée et la conjonctive en cas de sécheresse oculaire due à l'utilisation de lentilles de contact. La formule a été développée pour assurer un confort maximal dès les premiers instants de l'application. Convient à une utilisation quotidienne, de jour comme de nuit. Sans conservateur et/ou agent anti-inflammatoire ou vasoconstricteur.

INDICATIONS D'UTILISATION

EUMILL REPAIR est indiqué :

- Pour restaurer et améliorer la stabilité du film lacrymal chez les patients atteints du syndrome de l'œil sec ;
- Suite à une chirurgie réfractive ;
- Pour soulager les yeux en cas de rougeur, de fatigue et de gêne oculaire ou de la muqueuse oculaire causés par :
 - des facteurs environnementaux (climatisation, exposition excessive au soleil, vent, fumée, pollution, eau de mer ou de piscine et sel marin) ;
 - la sécheresse oculaire consécutive à une fatigue excessive due au fait d'étudier ou de travailler à l'ordinateur pendant de longues périodes ;
 - le larmoiement anormal à la suite d'une inflammation et d'une blépharite chronique ;
 - le larmoiement anormal à la suite de divers types de chirurgie oculaire ou d'une chirurgie esthétique des paupières ;
 - l'utilisation de lentilles de contact souples ou semi-rigides.

CONSEILS D'UTILISATION



1 Retirer l'anneau de sécurité du bouchon avant utilisation.



2 Retirer le bouchon.



3 Exercer une légère pression sur le flacon et instiller 2 à 3 gouttes dans chaque œil selon le besoin.



4 Après utilisation, refermer immédiatement le flacon en appuyant sur le bouchon.

Au fur et à mesure que le flacon se vide, il peut être nécessaire de presser plus fort pour permettre au produit de s'écouler, en raison des propriétés du flacon doté d'un système multidose sans conservateur. Après la première ouverture, le produit dans le flacon peut être utilisé dans les 3 mois.

PRÉCAUTIONS

Le produit est destiné à un usage ophtalmique externe uniquement.

Le produit ne peut être utilisé que par un seul patient.

Ne pas utiliser le produit si le flacon est endommagé ou n'est pas parfaitement fermé au moment de la première utilisation.

Ne pas toucher l'œil avec l'embout du flacon.

En raison de la viscosité du produit, une vision légèrement floue peut survenir immédiatement après l'instillation mais elle disparaît rapidement.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants du produit.

En cas de problèmes pendant l'utilisation, interrompre le traitement et consulter un médecin.

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Ne pas jeter le flacon dans l'environnement après utilisation.

Tenir hors de portée des enfants.

COMPOSITION

Hyaluronate de sodium réticulé en solution aqueuse (dont hyaluronate de sodium réticulé à 0,4%), Trométamol, Acide Chlorhydrique 2N, Chlorure de sodium, eau pour préparations injectables. Sans conservateur.

CONDITIONNEMENT : Contient un flacon multidose avec un système de fermeture OSD (ophthalmic squeeze dispenser) contenant 10 ml de produit sans conservateur.

CONDITIONS DE STOCKAGE : Conserver à une température comprise entre 2°C et 30°C dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Le produit peut être utilisé dans les 3 mois suivant la première ouverture.

PÉREMPTION : Ne pas utiliser le produit non ouvert après la date de péremption indiquée sur l'emballage et l'étiquette.

 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milan - Italie

DISTRIBUTEUR : Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI

Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux - France - Tél : 33 (0)1 45 19 10 00

DATE DE RÉVISION : 03/2021

STERILE A

Dispositif médical

 0425

 **RECORDATI**



V 37650.01 FL

6938 A
021271

Eumill[®]

REPAIR

SÉCHERESSE OCULAIRE

GOUTTES OCULAIRES LUBRIFIANTES, HYDRATANTES ET RÉPARATRICES
ACIDE HYALURONIQUE RÉTICULÉ 0,4% AVEC DE L'URÉE À ACTION PROLONGÉE

EUMILL REPAIR est une solution ophtalmique stérile au pH physiologique, contenant de l'acide hyaluronique réticulé avec de l'urée, selon une technologie brevetée, visant à augmenter et à améliorer les propriétés mécaniques naturelles de l'acide hyaluronique, ce qui lui confère une résistance à la dégradation par les hyaluronidases plus durable que celle de l'acide hyaluronique naturel. La structure réticulée formée par l'acide hyaluronique hydrate et permet de retenir les molécules d'eau pendant une longue période, renforçant ainsi les propriétés lubrifiantes intrinsèques de l'acide hyaluronique tout en augmentant son action hydratante. L'acide hyaluronique réticulé est indiqué comme adjuvant dans le syndrome de l'œil sec. Il est également efficace pour lutter contre les radicaux libres et a une action réparatrice (ré-épithélialisante) pour une meilleure protection de la surface cornéenne. L'acide hyaluronique réticulé confère au produit des propriétés lubrifiantes, hydratantes et réparatrices. Il soulage également la sécheresse oculaire due au syndrome de l'œil sec, la fatigue ou l'irritation oculaire causées par des processus inflammatoires ou des conditions environnementales.


EUMILL REPAIR soulage les yeux rouges, la sécheresse, la fatigue et la gêne oculaire causés par le syndrome de l'œil sec, les facteurs environnementaux tels que le vent, la fumée, la pollution, l'exposition prolongée au soleil, le sel marin, l'eau de mer ou de piscine, les études ou le travail intensifs, l'utilisation prolongée de l'ordinateur, les longues périodes de conduite, les larmoiements générés par les processus inflammatoires, la chirurgie oculaire ou esthétique des paupières et la blépharite chronique. Il hydrate et lubrifie la cornée et la conjonctive en cas de sécheresse oculaire due à l'utilisation de lentilles de contact. La formule a été développée pour assurer un confort maximal dès les premiers instants de l'application. Convient à une utilisation quotidienne, de jour comme de nuit. Sans conservateur et/ou agent anti-inflammatoire ou vasoconstricteur.

INDICATIONS D'UTILISATION


EUMILL REPAIR est indiqué :

- Pour restaurer et améliorer la stabilité du film lacrymal chez les patients atteints du syndrome de l'œil sec ;
- Suite à une chirurgie réfractive ;
- Pour soulager les yeux en cas de rougeur, de fatigue et de gêne oculaire ou de la muqueuse oculaire causés par :
 - des facteurs environnementaux (climatisation, exposition excessive au soleil, vent, fumée, pollution, eau de mer ou de piscine et sel marin) ;
 - la sécheresse oculaire consécutive à une fatigue excessive due au fait d'étudier ou de travailler à l'ordinateur pendant de longues périodes ;
 - le larmoiement anormal à la suite d'une inflammation et d'une blépharite chronique ;
 - le larmoiement anormal à la suite de divers types de chirurgie oculaire ou d'une chirurgie esthétique des paupières ;
 - l'utilisation de lentilles de contact souples ou semi-rigides.

CONSEILS D'UTILISATION : après ouverture du sachet de protection

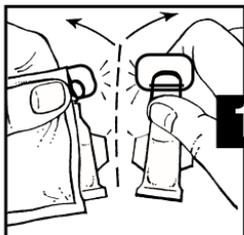


1 Détacher un seul récipient unidose de la barrette composée de 5 récipients.

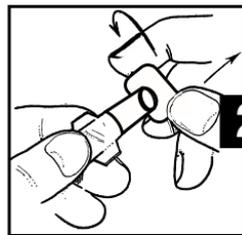

2 Tourner l'extrémité du récipient unidose et retirer le capuchon de fermeture, qui peut être utilisé pour refermer le récipient.



3 Exercer une légère pression sur le récipient unidose et instiller 2 à 3 gouttes dans chaque œil selon le besoin.

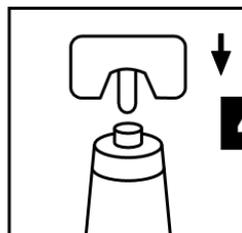

4 Après utilisation, refermer immédiatement le récipient unidose : le contenu peut être réutilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture.

PRÉCAUTIONS

Le produit est destiné à un usage ophtalmique externe uniquement.

Le produit ne peut être utilisé que par un seul patient.

Ne pas utiliser le produit si le récipient est endommagé ou n'est pas parfaitement fermé au moment de la première utilisation.

Ne pas toucher l'œil avec l'embout du récipient.

En raison de la viscosité du produit, une vision légèrement floue peut survenir immédiatement après l'instillation mais elle disparaît rapidement.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants du produit. En cas de problèmes pendant l'utilisation, interrompre le traitement et consulter un médecin.

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Ne pas jeter le récipient dans l'environnement après utilisation.

Tenir hors de portée des enfants.

COMPOSITION

Hyaluronate de sodium réticulé en solution aqueuse (dont hyaluronate de sodium réticulé à 0,4%), Trométamol, Acide Chlorhydrique 2N, Chlorure de sodium, eau pour préparations injectables. Sans conservateur.

CONDITIONNEMENT : Contient 2 sachets de 5 récipients unidoses chacun. Récipient unidose refermable de 0,5 ml équivalent à environ 10 gouttes.

CONDITIONS DE STOCKAGE : Conserver à une température comprise entre 2°C et 30°C dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Le produit peut être utilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture.

PÉREMPTION : Ne pas utiliser le produit non ouvert après la date de péremption indiquée sur l'emballage et l'étiquette.

 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milan - Italie

DISTRIBUTEUR : Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI

Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux - France - Tél : 33 (0)1 45 19 10 00

DATE DE RÉVISION : 03/2021

STERILE A

Dispositif médical

 0425



 **RECORDATI**

V 37650.01 U

6935 A

021317